




1) Připravte z otisku sádrový model pro požadovanou klinickou aplikaci a naizolujte ho.

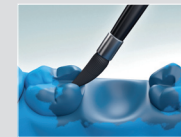


2) Začněte výstavbu spodní části můstku z kompozitního výplňového materiálu. Pro ochranu oblasti mezi můstkem a gingivou použijte kovovou či plastovou matici.

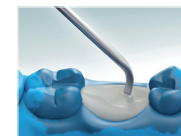


3) Vytvrdte kompozit v souladu s doporučením výrobce.

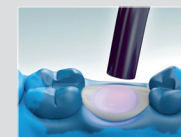


4) Aplikujte tenkou vrstvu kompozitního výplňového materiálu podél oblasti umístění pásku Dentapreg®. **KOMPOZIT NEVYTVRZUJTE!!!**

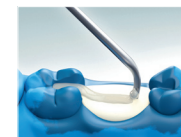

5) Změřte požadovanou délku pásku Dentapreg®.

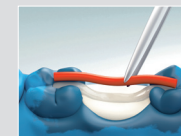

6) Vyjměte pásek Dentapreg® BUNDLE z blistru a ustrihněte ho pomocí nůžek na požadovanou délku. Nedotýkejte se nechráněné části pásku holou rukou. Vždy používejte latexové nebo vinylové, nepudrované rukavice. Nespotřebovanou část pásku vraťte zpět do blistru a zakryjte ho přiloženou ochrannou folií (light-protecting foil). Nespotřebovanou část pásku uchovávejte na tmavém místě, ideálně v lednici, po dobu maximálně 2 týdnů.

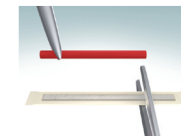


7) Z pásku odstraňte ochrannou folii a papír a pásek umístěte do požadované pozice v nevytvrzeném kompozitu. Pro jednodušší adaptaci a manipulaci s páskem použijte nástroj Dentapreg® Fork.




Výrobce:

ADM, a.s., U Vodárny 2, Brno 616 00,
Czech Republic, www.dentapreg.com

- 8) Pásek vytvrzujte po dobu minimálně 40 s pro každý zub.
Pro ochranu částí pásku před vytvrzením můžete použít nástroj Dentapreg® Shield.


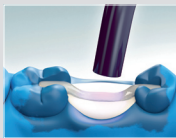


- 9) Začněte s výstavbou můstku z kompozitního výplňového materiálu dle doporučení výrobce. Je nezbytné, aby celá plocha pásku byla zakryta kompozitem! Mezizubní prostory nechte volné pro umožnění hygieny.

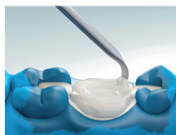


- 10) V případě potřeby zvýšit pevnost výsledného kompozitního můstku je doporučeno umístit pod vrstvu v oblasti skloviny pásek Dentapreg® VEIL* jako přídatnou výztuž.

* Je nezbytné umístit pásek Dentapreg® VEIL do nevytvrzeného kompozitu, adaptovat ho do požadované pozice a následně vytvrdit po dobu minimálně 40 s.

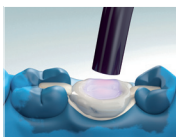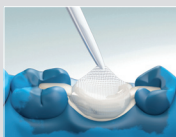

- 11) Vytvrdte celý můstek v souladu s doporučením výrobce.
Pro finální dotvrzení je také možné použít polymerační píčku.

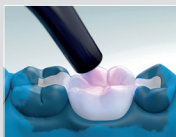

- 12) Můstek dokončete, upravte povrch okluze a můstek vyleštěte.



Složení

Dentapreg® BUNDLE, BRAID a VEIL
Monomer na bázi dimetakrylátů
40 - 50 hm.% v závislosti na typu produktu.
Skleněná vlákna 50 - 60 hm.% v závislosti
na typu produktu.
Ostatní složky: Katalyzátory a stabilizátory.

Upozornění

Používejte ochranné brýle během procesu
vytvzování pásku Dentapreg®.

Nepoužívejte produkt Dentapreg®,
jestliže je jeho ochranný obal poškozen.

Nepoužívejte produkt Dentapreg®,
jestliže uplynula doba expirace.

Kontraindikace

Použití pásků Dentapreg® je kontraindikováno u
pacientů u nichž je známá alergická reakce na některou
ze složek, kterou produkty Dentapreg® obsahují.

Doporučení

- Během manipulace s pásky Dentapreg® použijte
ochranné latexové nebo vinylové nepudrované
rukavice.

- Pásek Dentapreg® musí být vždy zcela překryt
kompozitem.

- Optimální tloušťka kompozitní vrstvy mezi okluzí
a páskem Dentapreg® je 2 mm.


- Pásek Dentapreg® je optimální umístit co nejvíce
v ose incizní hrany. To zajišťuje maximální vyztužení
můstku v předním úseku chrupu.

- Pásek Dentapreg® je ideální adaptovat co nejbližší
ke gingivě k zajištění maximálního vyztužujícího
efektu při budování můstků v postranním úseku
chrupu.

- Pro adaptaci pásků Dentapreg® doporučujeme
používat kovové nástroje jako je např. pinzeta
nebo špachtle.

- Pro zvýšení životnosti doporučujeme pro aplikace
s pásky Dentapreg® používat kompozitní výplňový
materiál. Pro krátkodobá provizoria a dočasné
aplikace lze používat kompozity typu flowable.

Datum revize: 25. 3. 2014

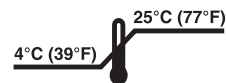

CE 1023