

Určené účely použití

Zdravotnický prostředek (ZP) určený ke stabilizaci chrupu ve frontálním úseku při viklavosti nebo potřebě fixace zubů v určené poloze. ZP je používán ke zhotovování stabilizačních dlah v parodontologii a traumatologii a pro tvorbu mezerníků a post-ortodontických retencí v ortodoncii. Pozn. Způsob aplikace ZP je pro všechny výše zmíněné určené účely použití analogický.

Složení

Dentapreg® SFU, SFM, PFU, PFM a UFM
Monomer na bázi dimetakrylátů 40 - 50 hm.%
v závislosti na typu produktu.
Sklenná vlákna 50 - 60 hm.% v závislosti
na typu produktu.
Ostatní složky: Katalyzátory a stabilizátory

Upozornění

Používejte ochranné brýle během procesu vytvrzování a chráňte také oči pacienta.

Nepoužívejte produkt Dentapreg®,
jestliže je jeho ochranný obal poškozen.

Nepoužívejte produkt Dentapreg®,
jestliže uplynula doba expirace.

Výrobce

ADM, a.s., U Vodárny 2, Brno 616 00,
Czech Republic, www.dentapreg.com

Datum revize: 08. 12. 2017

Kontraindikace

Použití pásek Dentapreg® je kontraindikováno u pacientů u nichž je známá alergická reakce na některou ze složek, kterou produkty Dentapreg® obsahují.

Doporučení

- Během manipulace s pásky Dentapreg® použijte ochranné latexové nebo vinylové nepudrované rukavice.

- Pásek Dentapreg® musí být vždy zcela překryt kompozitem.

- Dlahu nesmí překážet okluzi.

- Bodová fixace dlahy kompozitem nestačí u připevnění dlahy k povrchu zubů. Upevněte pásek Dentapreg® k zubům po celé jeho délce.

- Pokud chybí u dlahovaných zubů body kontaktu, dobudujte je z kompozitu!


- Pro adaptaci pásků Dentapreg® doporučujeme používat kovové nástroje jako je např. pinzeta nebo špachtle.

- Pro zvýšení životnosti doporučujeme pro aplikaci s pásky Dentapreg® používat kompozitní výplňový materiál. Pro krátkodobá provizoria a dočasné aplikace lze používat kompozity typu flowable.

1) Změřte požadovanou délku dlahy. Na měření použijte voskový drát, vlákno wedjets, zubní nit nebo jiný vhodný materiál.



2) Očistěte povrch dlahovaných zubů. Nedoporučujeme používat prophy pasty s obsahem fluoridů.

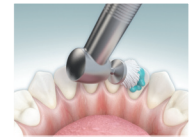

3) Zajistěte suché pracovní pole, např. bavlněnými válečky nebo použijte kofrdam.



4) Izolujte mezizubní prostory dřevěnými nebo plastovými klínky nebo použijte vlákno wedjets.





5) Zdrsňte povrch dlahovaných zubů diamantovým vrtákem nebo abrazivním diskem. Tento druh preparace není nutný u krátkodobých dlah (post-traumatické dlahy).



6) Naleptejte povrch zubů a mezizubní prostory leptacím gelem s 37% kyselinou ortofosforečnou. Při nanášení dbejte pokynů výrobce.



7) Důkladně opláchněte a osušte.

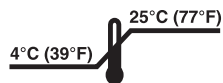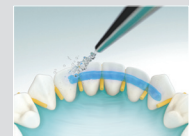


8) Naneste na naleptaný povrch zubů tenkou vrstvu adhezivního systému.



15) Vytvrďte kompozit podle pokynů výrobce.




9) Vytvrďte adhezivum podle pokynů výrobce.

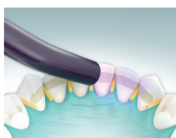

16) Odstraňte případné přebytky kompozitu.



10) Vyjměte pásek Dentapreg® SFM z blistry a ustříhněte ho pomocí nůžek na požadovanou délku. Nedotýkejte se nechráněné části pásku holou rukou. Vždy používejte latexové nebo vinylové, nepudrované rukavice. Nespotebovanou část pásku uchovávejte v ochranném obalu (light protection box), který je součástí balení. Uchovávejte ji na tmavém místě, ideálně v lednici. Můžete ji použít během následujících 4 týdnů.

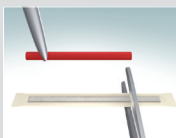

17) Dlahu vyleštěte.



11) Naneste tenkou vrstvu (cca. 0,5 mm) kompozitního výplňového materiálu po celé délce dlahované oblasti. NEVYTVRZUJTE!



18) Hotová dlahu.




Pro krátkodobé dlahování (např. trauma dlahy) můžete použít kompozit typu flowable.

12) Z pásku odstraňte ochrannou folii a papír a vložte jej do nevytvrzeném kompozitu a adaptujte ho na povrch zubů. Pro jednodušší adaptaci a manipulaci s páskem použijte nástroj Dentapreg® Fork.



13) Pásek vytvrzujte po dobu minimálně 40 s pro každý zub. Pro ochranu části pásku před vytvrzením můžete použít nástroj Dentapreg® Shield.

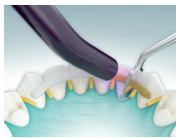

14) Pro zajištění hladkého povrchu dlahy překryjte celý její povrch tenkou vrstvou flowable nebo výplňového kompozitu.



Pokud chybí u dlahovaných zubů body kontaktu, dobudujte je z kompozitu!

Poznámka: Dlahu s preparací

Pro lepší stabilizaci zubů se zvýšenou viklavostí je vhodnější zhotovit dlahu s preparací. Postup pro zhotovení intrakoronární dlahy se od extrakoronární dlahy liší pouze preparací žlábků na dlahovaných zubech. Šířka žlábků musí být dostatečně velká, aby do něj bylo možné vložit pásek Dentapreg®, jehož šířka je 2 mm.