




1) Připravte z otisku sádrový model pro požadovanou klinickou aplikaci a naizolujte ho.

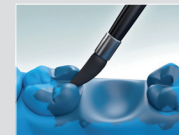


2) Začněte výstavbu spodní části můstku z kompozitního výplňového materiálu. Pro ochranu oblasti mezi můstkem a gingivou použijte kovovou či plastovou matici.

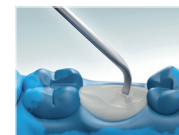


3) Vytvrdte kompozit v souladu s doporučením výrobce.

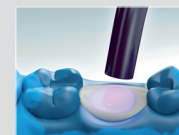


4) Aplikujte tenkou vrstvu kompozitního výplňového materiálu podél oblasti umístění pásku Dentapreg®. **KOMPOZIT NEVYTVRZUJTE!!!**

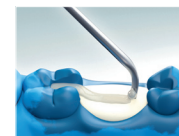


5) Změřte požadovanou délku pásku Dentapreg®.

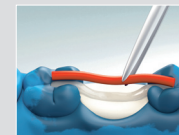

6) Vyjměte pásek Dentapreg® BUNDLE z blistru a ustrihněte ho pomocí nůžek na požadovanou délku. Nedotýkejte se nechráněné části pásku holou rukou. Vždy používejte latexové nebo vinylové, nepudrované rukavice. Nespotřebovanou část pásku vraťte zpět do blistru a zakryjte ho přiloženou ochrannou folií (light-protecting foil). Nespotřebovanou část pásku uchovávejte na tmavém místě, ideálně v lednici, po dobu maximálně 2 týdnů.

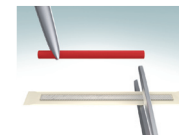


7) Z pásku odstraňte ochrannou folii a papír a pásek umístěte do požadované pozice v nevytvrzeném kompozitu. Pro jednodušší adaptaci a manipulaci s páskem použijte nástroj Dentapreg® Fork.

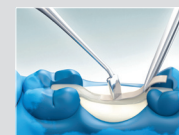


Výrobce:

ADM, a.s., U Vodárny 2, Brno 616 00,
Czech Republic, www.dentapreg.com

- 8) Pásek vytvrzujte po dobu minimálně 40 s pro každý zub.
Pro ochranu částí pásku před vytvrzením můžete použít nástroj Dentapreg® Shield.


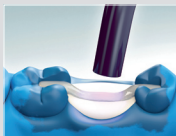


- 9) Začněte s výstavbou můstku z kompozitního výplňového materiálu dle doporučení výrobce. Je nezbytné, aby celá plocha pásku byla zakryta kompozitem! Mezizubní prostory nechte volné pro umožnění hygieny.

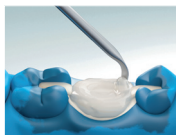


- 10) V případě potřeby zvýšit pevnost výsledného kompozitního můstku je doporučeno umístit pod vrstvu v oblasti skloviny pásek Dentapreg® VEIL* jako přídatnou výztuž.

* Je nezbytné umístit pásek Dentapreg® VEIL do nevytvrzeného kompozitu, adaptovat ho do požadované pozice a následně vytvrdit po dobu minimálně 40 s.

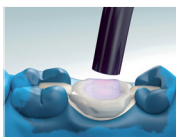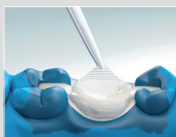

- 11) Vytvrdte celý můstek v souladu s doporučením výrobce.
Pro finální dotvrzení je také možné použít polymerační píčku.

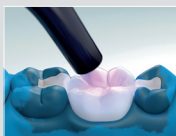

- 12) Můstek dokončete, upravte povrch okluze a můstek vyleštete.



Určené účely použití

Zdravotnický prostředek (ZP) určený ke zhotovení dočasných a semi-permanentních lepených můstků v postranním úseku chrupu nepřímou metodou.

Složení

Dentapreg® BUNDLE, BRAID a VEIL
Monomer na bázi dimetakrylátů
40 - 50 hm.% v závislosti na typu produktu.
Sklenná vlákna 50 - 60 hm.% v závislosti na typu produktu.
Ostatní složky: Katalyzátory a stabilizátory.

Upozornění

Používejte ochranné brýle během procesu vytvrzování pásku Dentapreg®.

Nepoužívejte produkt Dentapreg®, jestliže je jeho ochranný obal poškozen.

Nepoužívejte produkt Dentapreg®, jestliže uplynula doba expirace.

Kontraindikace

Použití pásků Dentapreg® je kontraindikováno u pacientů u nichž je známá alergická reakce na některou ze složek, kterou produkty Dentapreg® obsahují.

Doporučení

- Během manipulace s pásky Dentapreg® použijte ochranné latexové nebo vinylové nepudrované rukavice.

- Pásek Dentapreg® musí být vždy zcela překryt kompozitem.

- Optimální tloušťka kompozitní vrstvy mezi okluzí a páskem Dentapreg® je 2 mm.

- Pásek Dentapreg® je ideální adaptovat co nejbližší ke gingivě k zajištění maximálního vyztužujícího efektu při budování můstků v postranním úseku chrupu.

- Pro adaptaci pásků Dentapreg® doporučujeme používat kovové nástroje jako je např. pinzeta nebo špachtle.

- Pro zvýšení životnosti doporučujeme pro aplikace s pásky Dentapreg® používat kompozitní výplňový materiál. Pro krátkodobá provizoria a dočasné aplikace lze používat kompozity typu flowable.

Datum revize: 08. 12. 2017

