


1) Očistěte a napreparujte pilříkové zuby.



8) Vyjměte pásek Dentapreg® PFU z blistry a ustrřihněte ho pomocí nůžek na požadovanou délku. Nedotýkejte se nechráněné části pásku holou rukou. Vždy používejte latexové nebo vinylové, nepudrované rukavice. Nespoteřebanou část pásku uchovávejte v ochranném obalu (light protection box), který je součástí balení. Uchovávejte ji na tmavém místě, ideálně v lednici. Můžete ji použít během následujících 4 týdnů.

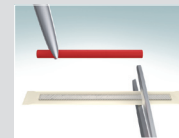


14) Můstek dokončete, upravte povrch okluze a můstek vyleštěte.




2) Zhotovte otisk chrupu.




9) Z pásku odstraňte ochrannou folii a papír a pásek umístěte do požadované pozice v nevytvrzeném kompozitu. Pro jednodušší adaptaci a manipulaci s páskem použijte nástroj Dentapreg® Fork.

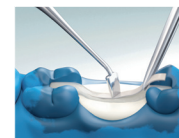


15) Pro zlepšení adheze doporučujeme opískovat retenční plochy můstku pomocí 30µm Al₂O₃. Naneste na retenční plochy vrstvu primeru a nechte odpařit rozpouštědlo.

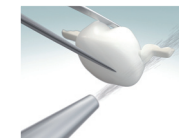

3) Připravte si sádrový model a naizolujte ho. Můžete také zhotovit alginátový otisk chrupu, zhotovit silikonový model a připravit můstek na tomto modelu.

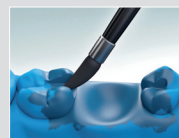


10) Pásek vytvrzujte po dobu minimálně 40 s pro každý zub. Pro ochranu částí pásku před vytvrzením můžete použít nástroj Dentapreg® Shield.

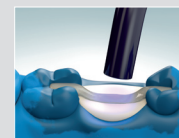


16) Naneste na retenční plochy můstku vrstvu tmelícího kompozitního cementu.



4) Začněte výstavbu spodní části můstku z kompozitního výplňového materiálu. Pro ochranu oblastí mezi můstkem a gingivou použijte kovovou či plastovou matici.

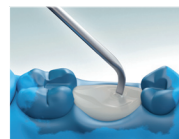


11) Začněte s výstavbou můstku z kompozitního výplňového materiálu dle doporučení výrobce. Je nezbytné, aby celá plocha pásku byla zakryta kompozitem! Mezizubní prostory nechte volné pro umožnění hygieny.

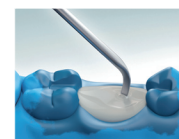

17) Nasadte můstek.



5) Vytvrďte kompozit v souladu s doporučením výrobce.

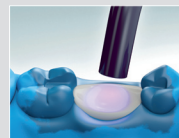


12) V případě potřeby zvýšit pevnost výsledného kompozitního můstku je doporučeno umístit pod vrstvu v oblasti skloviny pásek Dentapreg® UFM* jako přídatnou výztuž.
* Je nezbytné umístit pásek Dentapreg® UFM do nevytvrzeného kompozitu, adaptovat ho do požadované pozice a následně vytvrdit po dobu minimálně 40 s!




18) Odstraňte přebytek tmelícího cementu.



6) Aplikujte tenkou vrstvu kompozitního výplňového materiálu podél oblasti umístění pásku Dentapreg®. KOMPOZIT NEVYTVRZUJTE!!!

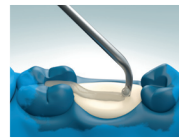



13) Vytvrďte celý můstek v souladu s doporučením výrobce. Pro finální dotvrzení je také možné použít polymerační píčku.

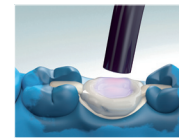

19) Vyartikuluje můstek a vyleštěte ho.



7) Změřte požadovanou délku pásku Dentapreg®.

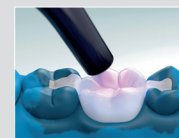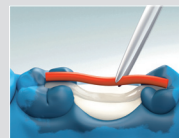

Poznámka: Přímá metoda

Tyto kroky se týkají výstavby můstku nepřímou technikou. Můžete také postupovat přímou metodou v ústech pacienta, ale práce na modelu je pohodlnější a jednodušší než přímá technika a výsledný můstek je přesnější a estetičtější.

Určené účely použití

Zdravotnický prostředek (ZP) určený ke zhotovování dočasných a semi-permanentních lepených můstků v postranním úseku chrupu přímou nebo nepřímou metodou.

Složení

Dentapreg® SFU, SFM, PFU, PFM a UFM
Monomer na bázi dimetakrylátů 40 - 50 hm.%
v závislosti na typu produktu.
Skleněná vlákna 50 - 60 hm.% v závislosti
na typu produktu.
Ostatní složky: Katalyzátory a stabilizátory

Upozornění

Používejte ochranné brýle během procesu
vytvzování a chraňte také oči pacienta.

Nepoužívejte produkt Dentapreg®,
jestliže je jeho ochranný obal poškozen.

Nepoužívejte produkt Dentapreg®,
jestliže uplynula doba expirace.

Výrobce

ADM, a.s., U Vodárny 2, Brno 616 00,
Czech Republic, www.dentapreg.com

Datum revize: 08. 12. 2017

Kontraindikace

Použití pásků Dentapreg® je kontraindikováno
u pacientů u nichž je známá alergická reakce
na některou ze složek, kterou produkty Dentapreg®
obsahují.

Doporučení

- Během manipulace s pásky Dentapreg® použijte
ochranné latexové nebo vinylové nepudrované
rukavice.

- Pásek Dentapreg® musí být vždy zcela překryt
kompozitem.

- Optimální tloušťka kompozitní vrstvy mezi okluzí
a páskem Dentapreg® je 2 mm.

- Pásek Dentapreg® je ideální adaptovat co nejbližší
ke gingivě k zajištění maximálního vyztužujícího
efektu při budování můstků v postranním úseku
chrupu.

- Pro adaptaci pásků Dentapreg® doporučujeme
používat kovové nástroje jako je např. pinzeta
nebo špachtle.

- Pro zvýšení životnosti doporučujeme pro aplikace
s pásky Dentapreg® používat kompozitní výplňový
materiál. Pro krátkodobá provizoria a dočasné
aplikace lze používat kompozity typu flowable.

